


Guía de conexiones para Holter del DR200/HE

Colocación de 5 electrodos

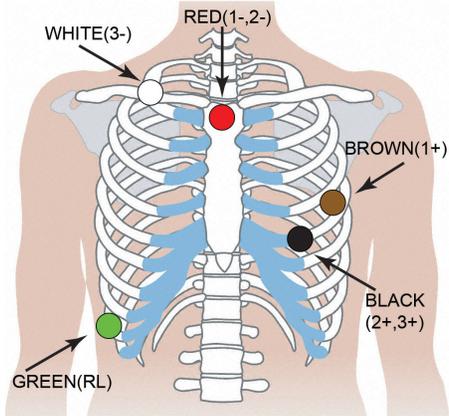


Electrodos		
--	+	
RED	BROWN	Ch. 1 CM5
RED	BLACK	Ch. 2 aVF
WHITE	BLACK	Ch. 3 Der. II
GREEN		GREEN (Tierra)



PARA ACCEDER AL MENÚ PRINCIPAL:

- Remove and reinsert battery.
- Saque la pila y vuelva a insertarla.
- Si la pantalla presenta una cuenta regresiva de 15 segundos, habrá que interrumpir el proceso presionando los botones ENTER, ▼, ▲, y EVENT, en ese orden.


Colocación de 7 electrodos

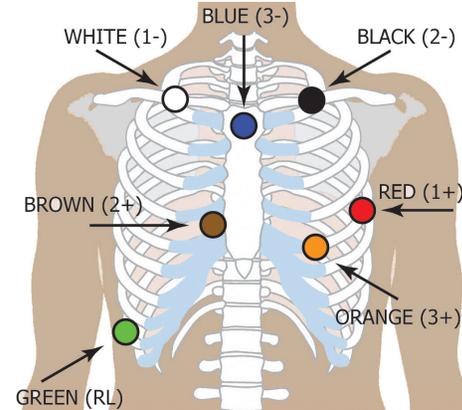

Electrodos		
--	+	
WHITE	RED	Ch. 1 mod.V5
BLACK	BROWN	Ch. 2 mod.V1
BLUE	ORANGE	Ch. 3 Der. III
GREEN		GREEN (Tierra)

For oximetry, use only channels 1 and 2

Colocación de 3 electrodos

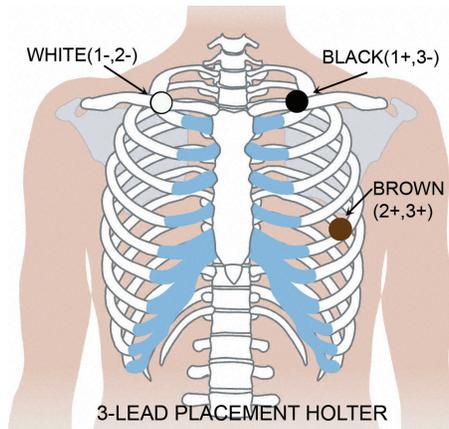


Electrodos		
--	+	
WHITE	BLACK	Ch. 1 Der. I
WHITE	BROWN	Ch. 2 Mod V5
BLACK	BROWN	Ch. 3 Mod III

3-LEAD PLACEMENT HOLTER

Preparación del paciente

- Seleccione un área sobre el hueso, evite los músculos y los tejidos del seno.
- Limpie muy bien con alcohol las áreas donde se colocarán los electrodos y rasúrelas.
- Abrasione las áreas donde se colocarán los electrodos con una almohadilla de fregar o una gasa. Permita que las áreas se sequen antes de aplicar los electrodos.
- Conecte bien los electrodos a las derivaciones.
- Aplique los electrodos en las áreas apropiadas y presione firmemente el borde adhesivo para que se adhiera completamente.
- Haga un doblez en las derivaciones y fíjelas con cinta adhesiva para reducir la tensión.

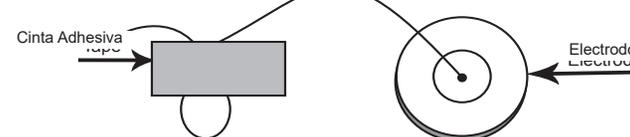

NorthEast Monitoring, Inc.

141 Parker Street, Suite 200
Maynard, MA 01754 USA
www.nemon.com



www.nemon.com

NEMM020 - Rev-L - Español

Guía de comienzo rápido para Holter del DR200/HE



ACTIVACIÓN DEL REGISTRADOR PARA HOLTER

Paso 1 - Inserte la tarjeta SD formateada y la pila en el registrador.

La pantalla presentará el modelo del registrador y luego información sobre "NorthEast Monitoring". Borre la memoria si el mensaje se lo indica. Pulse ENTER para acceder al menú principal.

Paso 2 – Ajuste los valores - Si desea ajustar los Valores, use las flechas - ▼ y ▲ - para desplazar el cursor y use el botón ENTER para seleccionar. Use las flechas para navegar al menú Valores generales y ajustar los valores introducidos. Pulse ENTER para seleccionar y retornar al menú.

Paso 3 – Introduzca la identificación del paciente - Desde el menú principal, vaya a la pantalla Nuevo paciente para introducir la Identificación del paciente. La Identificación del paciente debe tener por lo menos un carácter. Use las flechas y el botón ENTER para programar la identificación y pulse EVENT cuando haya concluido. (Mantenga presionado el botón ENTER para retroceder).

Paso 4 – Active el registrador - La pantalla presentará la señal del ECG y su calidad. El registrador se activará automáticamente después de 10 minutos o si se pulsa el botón EVENT durante 3 segundos. Mientras se registra el Holter, aparecerán en pantalla el tiempo y el nivel de la pila.

Para detener el registro, retire la pila del registrador. Al concluir el registro, presione la tarjeta suavemente hacia adentro para soltarla. Si tira de la tarjeta para sacarla podría dañar el registrador.

Si la pantalla presenta una cuenta regresiva de 15 segundos, puede interrumpir el proceso presionando los botones ENTER, ▼, ▲, y EVENT, en este orden.

VALORES GENERALES:

Contraste - Ajusta el contraste de la pantalla de cristal líquido

Deriv suelta - Activa/desactiva el mensaje de error de "Derivación suelta"

Marc evto - Define la ubicación de eventos en el ECG

Mod tec - "Silencio" desconecta la señal audible de la tecla. "Demora" obliga al paciente a presionar el botón durante varios segundos para registrar un evento y prevenir así el registro accidental de eventos

Reg tp - Holter

Blq menú - Bloquea los valores en el registrador

Se debe introducir "217" para bloquear el registrador

Se debe introducir "151" para desbloquear el registrador

Idioma – Permite elegir entre múltiples idiomas

Holter - Selecciona registros Holter en Alta Res (3 ca) o 1, 2 o 3 canal

Diario - Activar/Desactivar diarios de texto del paciente.

MENSAJES:

DERIVACIÓN SUELTA – Aparece cuando el paciente no está conectado o si hay un problema de conexión. El problema podría ser un electrodo, un alambre de derivación o el cable que conecta los alambres de derivación al registrador. El mensaje seguirá parpadeando durante aproximadamente 10 segundos después de haber corregido el problema. Una vez corregido el problema, la pantalla presentará primero el ECG y después la hora del día. Este Si lo desea, este mensaje de error se puede apagar en el menú principal.

Pila Baja o Falla – Coloque una pila nueva antes de activar el registrador.

Borrar memoria Sí/No - La tarjeta SD se debe borrar si se ha utilizado para un paciente previo. Si no se desea borrar porque contiene información sobre ECG que no se desea borrar, se debe retirar e introducir una nueva tarjeta SD formateada.

Errores de tarjeta SD - Se debe utilizar el software Holter para formatear las tarjetas SD.